

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



**ORLIMAN.**



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_Memoforme\_160705\_OrV0

**ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB33 Edition : 07/2016



**MEMOFORME®**

**> ATTELLE DE CHEVILLE**



**ORLIMAN.**

## CONTENU/DESCRIPTION

Une attelle de cheville Memoforme® :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme double densité,
- Évidements malléolaires interne/externe,
- Coque à double rigidité, rigide en partie supérieure et souple en sous malléolaire.
- Sangles fixées sur la coque avec fermeture par velcro®

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Traumatisme et entorse de cheville récente, Entorse tibio-tarsienne grave, Laxité chronique de la cheville.

## COMPOSITION

- Coussins :
  - Intérieur : 100% Coton,
  - Extérieur : 100% Polyamide,
  - Mousse : 100% Polyuréthane polyéther,
- Sangles : 100% Polyamide,
- Coque : Polypropylène.

## TAILLANT

TAILLE	TAILLE DU PATIENT (CM)
Petit	< 160
Standard	> 160

## MISE EN PLACE

**A** (figure 1)

Placer le pied du patient au centre de la sangle calcanéenne.

**B** (figure 2)

Tout en maintenant l'attelle, attacher les bandes velcro® en repassant sur les sangles en suivant l'ordre du schéma ① et ②.

**C** (figure 3)

Ajuster les lanières de la sangle calcanéenne en tirant dessus vers le haut et les fixer sur les bandes velcro®.

**D**

Ajuster si nécessaire les bandes velcro®.

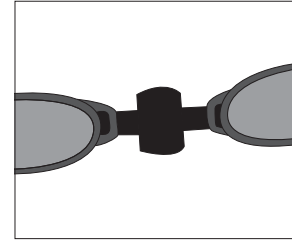


Figure 1

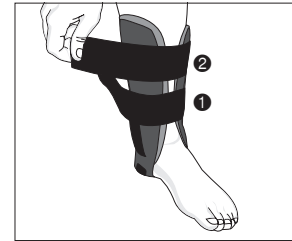


Figure 2

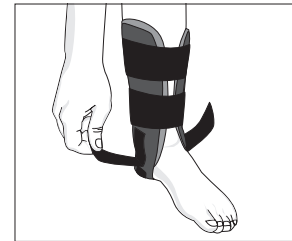


Figure 3



CONSULTEZ  
LA **VIDÉO**  
DE MISE EN PLACE