

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN.



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_NeoSoft_160705_OrV0



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elíana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB26 Edition : 09/2016



NEO SOFT®

› ATTELLE DE POIGNET



ORLIMAN.

CONTENU/DESCRIPTION

Attelle de poignet Neo Soft®:

- Éclisse palmaire en aluminium modelable et amovible,
- Sangle de prépositionnement.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Tendinite du poignet - Syndrome du canal carpien et de la souris informatique.

COMPOSITION

- Extérieur : Nylon 95% + Spandex 5%,
- Mousse interne : Chloroprène 100%,
- Intérieur : Polyamide 100%,
- Éclisse : Aluminium.

TAILLANT

Modèle gauche et droite.

| TAILLE | UNIQUE |
|--------|--------|
| | |

MISE EN PLACE

A (figure 1)

- À plat, enfiler l'attelle Néo Soft® sur le poignet traumatisé en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet.

B (figure 2)

- Positionner la sangle de prépositionnement en prenant soin de bien la tendre puis fixer avec le velcro®.

C (figure 3)

- Enrouler la sangle principale autour du poignet tout en ajustant le serrage comme désiré puis fixer avec le velcro®.

D (figure 4)

- Si nécessaire, retravailler l'éclisse palmaire à la forme de votre poignet puis répéter les opérations de mise en place **A**, **B** et **C**.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.smeurope.fr