

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 40°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,
- Nettoyage professionnel à sec modéré.



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_EcharpeUniverselleEpaule\_150529\_V3



ÉCHARPE UNIVERSELLE  
D'ÉPAULE



## CONTENU/DESCRIPTION

Une écharpe universelle d'épaule :

- Système doubles sangles : 1 sangle support d'avant-bras + 1 sangle scapulo-humérale,
- Fixation velcro® micro-injection facilement repositionnable, sans adhérer aux vêtements.

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Immobilisation après traumatisme de l'épaule ou du coude. Neurologie : paralysie, hémiplegie.

## COMPOSITION

- Extérieur : 100% polyester.
- Intérieur : 100% polyuréthane.
- Sans latex ni phtalate.

## TAILLANT

TAILLE
Unique

## MISE EN PLACE

### A (figure 1)

Centrer autour du cou la sangle de maintien de l'avant bras de manière à ce que les fixations velcro® soient tournées vers l'avant.

### B (figure 2)

- Placer le bras à 90° coude au corps.
- Régler la hauteur et refermer la sangle sur elle même à l'aide du velcro® en enveloppant l'avant bras.
- Renouveler l'opération sur la seconde extrémité de la sangle.

### C (figure 3 et 4)

- Fixer la sangle scapulo-humérale à l'aide du velcro® sur l'avant de la sangle de maintien.
- Envelopper le bras à immobiliser et passer ensuite sous l'aisselle du bras valide.
- Terminer de fixer la sangle scapulo-humérale à l'aide du velcro® en ajustant le degré d'immobilisation.

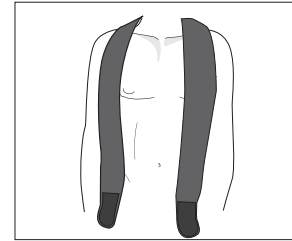


Figure 1

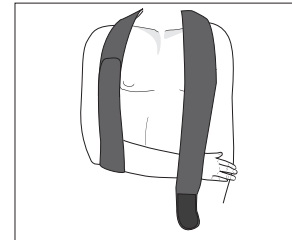


Figure 2

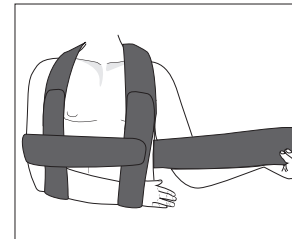


Figure 3



Figure 4



CONSULTEZ  
LA **VIDÉO**  
DE MISE EN PLACE