

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 40°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,
- Nettoyage professionnel à sec modéré.



Conserver le produit à température ambiante.



MAILLE FILET

› ÉCHARPE DE BRAS

Dispositif médical de classe I

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_EcharpeMailleFilet_150625_OrV0_Temp



CONTENU/DESCRIPTION

- Immobilisation du membre supérieur en position coude au corps :
- Maille filet aérée,
 - Capiton pour le confort de l'épaule,
 - 1 Languette de soutien du pouce,
 - 1 Sangle réglable en hauteur par boucle pour un ajustement adapté.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Soutien et maintien antalgique du bras et de l'avant-bras.

COMPOSITION

- Polyester 55%,
- Coton 25%,
- Nylon 15%,
- Mousse 5%.

Sans latex ni phtalate.

TAILLANT

TAILLE	AVANT BRAS (CM)
1	15 -21
2	21 - 32
3	32 - 43

MISE EN PLACE

- A**
- Placer l'avant-bras dans le manchon.
- B**
- Récupérer la sangle en la passant dans le dos puis par dessus l'épaule valide.
 - Passer la sangle dans les anneaux puis fixez-la à l'aide du velcro®.
- Ajuster le niveau de maintien si nécessaire.
- C**
- Pour plus de confort utiliser la languette de soutien pour le pouce.



CONSULTEZ
LA **VIDÉO**
DE MISE EN PLACE