

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



**ORLIMAN.**



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_NeoBoxer2-3\_170412\_OrV1



**ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB54 Edition : 04/2017



**NEO BOXER®**  
**2<sup>ÈME</sup> ET 3<sup>ÈME</sup> METACARPES**

**› ATTELLE DE POIGNET/DOIGTS**



**ORLIMAN.**

## CONTENU/DESCRIPTION

Attelle de poignet/doigts Neo Boxer® 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> métacarpes :

- 1 Éclisse palmaire modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales modelables et amovibles, permet d'ajuster le maintien en fonction de la pathologie.
- 1 Mini-éclisse de doigts à fixation velcro®.

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Fracture du 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> métacarpes, Traumatisme du poignet/main/doigts, Immobilisation post-opératoire.

## COMPOSITION

Extérieur : 100% Polyester,  
Mousse intérieure : 100% Polyester,  
Intérieur : 100% Coton,  
Éclisses : Aluminium et Polycarbonate.

## TAILLANT

Modèle gauche et droite.

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
1	14 - 16
2	16 - 18
3	18 - 20

## MISE EN PLACE

### A (figure 1)

- Avant de positionner l'attelle Neo Boxer®, former les éclisses dorsales selon l'angle d'immobilisation souhaité du poignet et des 2 doigts.
- Former également l'éclisse palmaire afin de faire correspondre son inclinaison à celle des éclisses dorsales vous assurant ainsi d'une immobilisation optimale.

### B (figure 2)

- Enfiler l'attelle Neo Boxer® en prenant bien soin d'aligner l'éclisse palmaire dans l'axe formé par la paume de la main et l'avant-bras.

### C (figure 3)

- Serrer la sangle située au niveau du poignet, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec le velcro®.

### D (figure 4)

- Serrer ensuite la sangle située au niveau de l'avant-bras, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec le velcro®.
- Couper les sangles si nécessaire.

### E (figures 5 et 6)

- Former la mini-éclisse de doigts selon l'angle d'immobilisation préalablement choisi pour les éclisses dorsales.
- Faites glisser la boucle de protection afin qu'elle soit bien positionnée au niveau du pli.

### F (figure 7)

- Décoller et ouvrir les 2 petites languettes velcro®.
- Positionner la mini-éclisse au niveau des doigts immobilisés à l'intérieur de la main.
- Refermer les 2 petites languettes sur la mini-éclisse pour la fixer au niveau de la paume de la main.

### G (figure 8)

- Serrer enfin la sangle située au niveau des doigts immobilisés puis fixer avec le velcro®.



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)



Figure 1

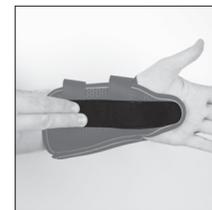


Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

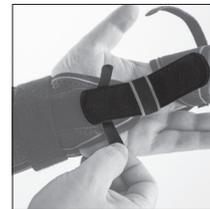


Figure 7



Figure 8