

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,
- Nettoyage professionnel à sec modéré.



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN



Dispositif médical de classe I
Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_Abdobelt_171218_OrV2

ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB13 Edition : 12/2017



ABDOBELT®

> CEINTURE ABDOMINALE



ORLIMAN

CONTENU/DESCRIPTION

Ceinture abdominale en tissu élastique aéré :

- 2 baleines dorsales et 3 frontales,
- Système de fermeture en double bandes auto-agrippantes avec système de passe-doigts pour une mise en place aisée,
- 3 Hauteurs : 18 cm, 25 cm et 30 cm,
- 1 patte Hypogastrique sur les modèles 18 et 25 cm,
- Modèle unisexe.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Déficience de la paroi abdominale, Événtration, Post-opératoire, Chirurgie de l'obésité, Post-partum, Laparotomie et lipectomie, Hernies simples, Fracture des côtes (18 et 25 cm).

COMPOSITION

Hauteur 18 et 25 cm :

Nylon 50%, Élasthane 15%, Polyester 15%, Acier 10%, Élastomère 5%, Mousse 5%.

Hauteur 30 cm :

Polyester 30%, Nylon 25 %, Élasthane 15%, Rayonne (soie artificielle) 10%, Polypropylène 10%, Élastomère 5%, Mousse 5%.

TAILLANT HAUTEUR 18 CM - 25 CM - 30 CM

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)
2	70 - 85
3	85 - 100
4	100 - 115
5	115 - 135
6	135 - 150

MISE EN PLACE

A (figure 1)

- Repérer l'étiquette "Abdobelt" pour positionner la ceinture dans le bon sens,
- Positionner le plastron cicatriciel en fonction de la pathologie et/ou de l'emplacement de la plaie.

B (figure 2)

- Maintenir le plastron cicatriciel à l'aide de votre main gauche.

C (figure 3)

- Positionner en premier la bande velcro inférieure sur la partie opposée à l'aide du passe-doigts puis fixer.
- Ajuster la bande velcro supérieure de la même manière puis fixer.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.orkiman.fr