



# ORLIMAN®

## ABDOBELT

Rachis lombaire



### ■ Domaines d'application :

Post-opératoire, Traumatologie.

### ■ Indications :

Fracture des côtes (18 et 25 cm), Déficience de la paroi abdominale, Événtration, Post-opératoire, Chirurgie de l'obésité, Hernie simple.

### ■ Caractéristiques :

- Baleines souples.
- Plastron cicatriciel découpable et indémaillable en cas de stomie.
- Tissu auto-agrippant, élastique et aéré avec 2 ressorts spiraliuims et 3 ressorts frontaux.
- Patte hypogastrique amovible (sur les hauteurs 18 et 25 cm).
- 3 hauteurs disponibles : 18, 25 et 30 cm.

TVA

5,50 %

LPPR

Hauteur 18 cm: 57.54 €  
201E00.31  
Hauteur 25 cm: 71.90 €  
201E00.32  
Hauteur 30 cm: 79.09 €  
201E00.32+2x201E030  
1



### TOUR DE TAILLE

### ■ Tableau de taille :

Taille	Tour de taille	ACL 13 - Hauteur 18 cm	Référence
Hauteur 18 cm			
2	70 - 85 cm	34010.4722919.0	TR0311.182
3	85 - 100 cm	34010.4722925.1	TR0311.183
4	100 - 115 cm	34010.4722931.2	TR0311.184
5	115 - 135 cm	34010.4722948.0	TR0311.185
6	135 - 150 cm	34010.6010700.0	TR0311.186
Hauteur 25 cm			
2	70 - 85 cm	34010.4722865.0	TR0311.252
3	85 - 100 cm	34010.4722871.1	TR0311.253
4	100 - 115 cm	34010.4722888.9	TR0311.254
5	115 - 135 cm	34010.4722894.0	TR0311.255
6	135 - 150 cm	34010.6010701.7	TR0311.256
Hauteur 30 cm			
2	70 - 85 cm	34010.4722807.0	TR0311.302
3	85 - 100 cm	34010.4722813.1	TR0311.303
4	100 - 115 cm	34010.4722836.0	TR0311.304
5	115 - 135 cm	34010.4722842.1	TR0311.305
6	135 - 150 cm	34010.6010702.4	TR0311.306

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**  
Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31  
smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)  
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93/42/CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.17/04/2020





**ORLIMAN**

## ABDOBELT

Rachis lombaire



### ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

#### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

#### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

### ■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

### ■ Mise en place :

Repérer l'étiquette "Abdobelt" pour positionner la ceinture dans le bon sens. Positionner le plastron cicatriciel en fonction de la pathologie et/ou de l'emplacement de la plaie. Maintenir le plastron cicatriciel à l'aide de votre main gauche. Positionner en premier la bande velcro® inférieure sur la partie opposée à l'aide du passe-doigts puis fixer. Ajuster la bande velcro® supérieure de la même manière puis fixer.

#### Composition :

Hauteur 18 et 25 cm : Nylon 50%, Élasthanne 15%, Polyester 15%, Acier 10%, Élastomère 5%, Mousse 5%. Hauteur 30 cm : Polyester 30%, Nylon 25%, Élasthanne 15%, Rayonne (soie artificielle) 10%, Polypropylène 10%, Élastomère 5%, Mousse 5%.

#### Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à température ambiante.

