


ORLIMAN®

BOTIMED AIR BASSE

Cheville/Pied



■ Domaines d'application :

Traumatologie, Post-opératoire.

■ Indications :

Fracture de la cheville, de la malléole et du cou-de-pied (tarses et métatarses), Entorse grave de la cheville, Permet un accroissement de la mobilité en post-opératoire.

■ Caractéristiques :

- Chausson enveloppant matelassé en tissu respirant avec protège orteils amovible.
- Coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier.
- Plaque rigide à positionner à l'avant du tibia.
- Coussin pneumatique répartissant l'air de manière homogène sur l'ensemble du chausson.
- Pompe de gonflage intégrée avec vanne de régulation.
- Fourniture d'un kit avec 2 coussinets de protection et 1 protège orteils de rechange.

TVA

5,50 %

LPPR

 64.40 €
2161530


POINTURE

■ Tableau de taille :

Taille	Hauteur de la botte	Pointure	ACL 13	Référence
1	21,5 cm	34 - 38	34010.9775501.4	CP0313.BI1
2	23 cm	38 - 43	34010.9775518.2	CP0313.BI2
3	24 cm	43 - 46	34010.9775524.3	CP0313.BI3

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais • 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

 smeurope@smeurope.fr • www.orliman.fr

Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.LU. - Distributeur France : SM Europe. v.25/02/2020





ORLIMAN®

BOTIMED AIR BASSE

Cheville/Pied



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

Composition :

Chausson : - Tissu en nylon brossé
: Polyamide 100%, - Mousse en fibre de polyuréthane :
Polyuréthane 100%, - Revêtement : Polyester 100%. Pompe de gonflage : Polyuréthane 100%, Poche d'air : - Nylon : Polamide 100%, - Structure : Polyuréthane thermoplastique 100%, Botte : - Structure : Polypropylène 100%, - Semelle extérieure : Polypropylène 100%, - Semelle intérieure : - Mousse : éthylène acétate de vinyle 100%, - Revêtement : Cellulose 100%, - Système de fermeture : Polyamide 100%, - Rivets : Acier inoxydable 100%. Ce produit contient des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.
Nettoyage à la main et au savon neutre (max. 30°C), Rincer soigneusement. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas javelliser. Ne pas utiliser de détergent. Conserver le produit à température ambiante.

■ Mise en place :

Il est conseillé de placer le produit en position assise et de porter, si possible, une chaussette en coton. - Ouvrir entièrement la botte. - Insérer le pied à l'intérieur du chausson et le refermer. Si nécessaire, placez les coussinets de protection dans des zones sensibles telles que le cou-de-pied ou les malléoles. - Placer le protège orteils sur le bout du pied. - Placer le pied sur la coque d'immobilisation rigide. - Fixer la plaque de renfort avant. - Refermer la botte grâce au système de fermeture par bandes auto-agrippantes. - Ajuster le maintien de façon à ce que l'articulation tibio-tarsienne soit parfaitement immobilisée. - S'assurer que l'articulation est maintenue à 90°. - Gonfler la poche d'air à l'aide de la pompe intégrée en tournant la valve dans le sens des aiguilles d'une montre. - Appuyer plusieurs fois sur la pièce orange jusqu'à obtenir la pression souhaitée. NOTE : Pour libérer l'air, tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

