

CONFORT PLUS Poignet-Pouce

Poignet/Main



■ Domaines d'application :

Post-opératoire, Traumatologie, Rééducation, Rhumatologie.

■ Indications :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, Blessure du scaphoïde.

■ Caractéristiques :

- 2 éclisses (latérale amovible et palmaire) en aluminium modelable.
- Éclisse latérale dotée d'un reposoir : évite une mauvaise rotation du pouce.
- Réglage par sangles et boucles anti-vrilles.
- Pince de crabe libérée par l'association d'une sangle et d'un repose pouce.

TVA

5,50 %

LPPR

53.18 €
2189800



TOUR DE POIGNET

■ Tableau de taille :

Taille	Tour de poignet	EAN 13	ACL 7	Référence
GAUCHE				
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000247	6033034	PM0314.GAE
DROIT				
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000186	6033026	PM0314.DRE

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes



ORLIMAN®

Kids

CONFORT PLUS Poignet-Pouce

Poignet/Main



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Extérieur : 100% Polyester,
Mousse intérieure : 100% Polyester, Intérieur : 100% coton,
Élisses : Aluminium et polycarbonate.

■ Mise en place :

Enfiler l'attelle Confort Plus® poignet/pouce comme un gant en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet. Serrer les sangles, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec le velcro®. Dans le cas du modèle "taille universelle", positionner préalablement l'éclisse dorsale sur le dos du poignet en prenant soin de bien l'aligner dans l'axe du poignet. Serrer la sangle de pouce en prenant bien soin de l'ajuster au plus proche de la jointure pouce/index.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

