



ORLIMAN®

Kids

NEO RHIZO CONFORT

Poignet/Main



■ **Domaines d'application :**
Traumatologie, Rééducation, Rhumatologie.

■ **Indications :**
Entorse de la métacarpophalangienne (MCP), Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.

- **Caractéristiques :**
- Éclisse latérale amovible et modelable autour du pouce.
 - Éclisse palmaire amovible (à disposer en cas d'entorse du pouce) et repositionnable.
 - Velcro® de prépositionnement.
 - Modèle ambidextre.
 - Existe en taille enfant.

TVA

5,50 %

LPPR

53.18 €
2189800

TOUR DE POIGNET

■ **Tableau de taille :**

Taille	Tour de taille	ACL 13	Référence
0	< 14 cm	34010.6018535.0	PM0116.B10

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017



NEO RHIZO CONFORT

Poignet/Main



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Extérieur : 95% Nylon + 5%
Spandex Mousse interne : 100%
Chloroprène Intérieur : 100%
Polyamide Éclisses : Aluminium

■ Mise en place :

L'attelle de pouce Neo Rhizo Confort® comporte 2 éclisses, une latérale modelable et une palmaire amovible selon le pouce traumatisé (droite ou gauche). Avant de mettre en place l'attelle, disposer l'éclisse palmaire dans le fourreau correspondant au pouce traumatisé : - Pour le pouce droit, dans le logement marqué de 1 bâton, - Pour le pouce gauche, dans le logement marqué de 2 bâtons. Enfiler l'attelle sur le poignet traumatisé en passant le pouce dans le logement prévu à cet effet Enrouler la sangle double autour du poignet en ajustant à la contention désirée. Fixer à l'aide du velcro® intermédiaire. Serrer la partie large de la sangle double et ajuster à la contention désirée puis fixer avec le velcro®. Faites de même avec la partie mince de la sangle double. Si nécessaire, travailler la partie circulaire de l'éclisse latérale à la forme du pouce. Serrer la sangle du pouce puis fixer avec le velcro®.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à
température ambiante.

