


**ORLIMAN**®

# NEO BOXER 2e et 3e métacarpes

Poignet/Main



## ■ Domaines d'application :

Traumatologie, Post-opératoire.

## ■ Indications :

Fracture du 2e et 3e métacarpes, Traumatismes du poignet/main-doigts, Immobilisation post-opératoire.

## ■ Caractéristiques :

- Mise en place facile.
- Respirante et confortable.
- Traitement des plaies facilité.
- 2 Éclisses dorsales modelables permettant l'immobilisation des doigts selon l'angle choisi et amovibles pour un ajustement du maintien en fonction de la pathologie.
- 1 éclisse palmaire modelable et amovible, préformée à la forme de la main pour apporter une immobilisation optimale tout en maintenant un grand niveau de confort.
- 1 mini-éclisse de doigts à fixation velcro®.
- Conception innovante en 2 zones distinctes permettant le positionnement et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

TVA

5,50 %

LPPR

 79.20 €  
2149440


TOUR DE POIGNET

## ■ Tableau de taille :

Taille	Tour de poignet	ACL 13	Référence
GAUCHE			
1	14 - 16 cm	34010.6018563.3	PM0511.GA1
2	16 - 18 cm	34010.6018564.0	PM0511.GA2
3	18 - 20 cm	34010.6018565.7	PM0511.GA3
DROIT			
1	14 - 16 cm	34010.6018556.5	PM0511.DR1
2	16 - 18 cm	34010.6018558.9	PM0511.DR2
3	18 - 20 cm	34010.6018561.9	PM0511.DR3

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

 Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
 Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31  
 smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)  
 Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.02/10/2017





**ORLIMAN**

## NEO BOXER 2e et 3e métacarpes

Poignet/Main



### ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

### Composition :

Extérieur : 100% Polyester,  
Mousse intérieure : 100%  
Polyester, Intérieur : 100% Coton,  
Éclisses : Aluminium et  
Polycarbonate.

### ■ Mise en place :

Avant de positionner l'attelle Neo Boxer®, former les éclisses dorsales selon l'angle d'immobilisation souhaité du poignet et des 2 doigts. Former également l'éclisse palmaire afin de faire correspondre son inclinaison à celle des éclisses dorsales vous assurant ainsi d'une immobilisation optimale. Enfiler l'attelle Neo Boxer® en prenant bien soin d'aligner l'éclisse palmaire dans l'axe formé par la paume de la main et l'avant-bras. Serrer la sangle située au niveau du poignet, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec le velcro®. Serrer ensuite la sangle située au niveau de l'avant-bras, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec le velcro®. Couper les sangles si nécessaire. Former la mini-éclisse de doigts selon l'angle d'immobilisation préalablement choisi pour les éclisses dorsales. Faites glisser la boucle de protection afin qu'elle soit bien positionnée au niveau du pli. Décoller et ouvrir les 2 petites languettes velcro®. Positionner la mini-éclisse au niveau des doigts immobilisés à l'intérieur de la main. Refermer les 2 petites languettes sur la mini-éclisse pour la fixer au niveau de la paume de la main. Serrer enfin la sangle située au niveau des doigts immobilisés puis fixer avec le velcro®.

### Entretien :

Nettoyage à la main et au savon  
(max. 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à  
température ambiante.

