



# ORLIMAN®

## NEO FINGER

Poignet/Main



### ■ Domaines d'application :

Traumatologie.

### ■ Indications :

Fracture, Entorse, Luxation des doigts.

### ■ Caractéristiques :

- Design minimaliste avec fermeture par 4 bandes anti-glisse, dont 3 amovibles, laissant une grande partie de la main à l'air libre, pour un meilleur confort tout au long de la journée.
- Éclisse palmaire modelable à la forme de la main pour une position d'immobilisation optimale.
- Modèle évolutif, l'attelle peut être coupée en fonction de l'évolution du traitement .

#### **NOUVEAUTÉ :**

**La largeur de l'éclisse est plus importante sur les tailles 3 et 4 pour une meilleure adaptation morphologique aux doigts du patient.**

TVA

5,5 %

LPPR

36.71 €  
2165194



LONGUEUR DE LA  
MAIN

Mesurer du majeur au  
poignet.

### ■ Tableau de taille :

Taille	Longueur de la main	ACL 13	Référence
1	< 13 cm	34010.6018543.5	PM0618.B11
2	13 - 17 cm	34010.6018546.6	PM0618.B12
3	17 - 20 cm	34010.6018547.3	PM0618.B13
4	20 - 22 cm	34010.6018548.0	PM0618.B14

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31  
smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)  
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.LU. - Distributeur France : SM Europe. v.27/02/2018





**ORLIMAN**

## NEO FINGER

Poignet/Main



### ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

### Composition :

Structure : baleine en Aluminium et protection 100% Polyamide.

Sangles : 83% Nylon et 17% Elasthanne.

### ■ Mise en place :

**IMMOBILISATION POIGNET & DOIGTS** Avant la mise en place de l'attelle NeoFinger®, commencer par former l'éclisse en aluminium afin de l'adapter au mieux à la forme du ou des doigts à immobiliser. Positionner l'attelle de manière à toucher le bout des doigts, l'éclisse en aluminium côté paume, suivant l'axe formé par les doigts à immobiliser et le poignet. Immobiliser avec les bandes de strapping en respectant l'ordre indiqué dans la notice et fermer avec les velcro®. **IMMOBILISATION DOIGTS** Pour une immobilisation plus ciblée sur les doigts, l'attelle peut être coupée au niveau de la première phalange. Utiliser ensuite le patch velcro® fourni pour refermer l'extrémité de l'attelle ainsi découpée. Positionner l'attelle de manière à toucher le bout des doigts et immobiliser avec les 2 bandes de strapping restantes.

### Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

