

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

ENTRETIEN

- Lavage machine (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,
- Nettoyage professionnel à sec modéré.



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN.



Dispositif médical de classe 1 - CE

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_3Pans_150908_OrV0



3 PANS®

› ATTELLE DE GENOU



ORLIMAN.

CONTENU/DESCRIPTION

Une attelle de genou 3 Pans® :

- Velcro® de pré-positionnement,
- Modèle adaptable grâce à ses 2 panneaux latéraux amovibles,
- Réglage par sangles avec boucle anti-vrilles,
- Baleines postérieures et latérales modelables.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Traumatisme et entorse du genou, lésion partielle ou déchirure d'un ligament, luxation de la rotule, immobilisation post-opératoire.

COMPOSITION

- Doublure : 100% polyester.
- Velours extérieur : 100% polyester.
- Mousse : 100% polyuréthane.
- Baleines métalliques : 100% aluminium.
- Sans latex ni phtalate.

TAILLANT

TAILLE	LONGUEUR (cm)	TOUR DE CUISSE (cm)
1	40	34 - 58
2	50	40 - 60
3	55	36 - 58
4	60	36 - 58
5	65	46 - 66

MISE EN PLACE

A

- Placer correctement l'attelle sur la jambe avec l'extrémité la plus large en haut (*figure 1*).
- Régler et fixer les panneaux latéraux (*figure 2*).

B

- (*figure 3*)
- Pré-positionner l'attelle à l'aide du velcro® (fournis).
 - Fixer l'attelle.

C

- (*figure 4*)
- Ajuster le maintien à l'aide des fermetures velcro®.

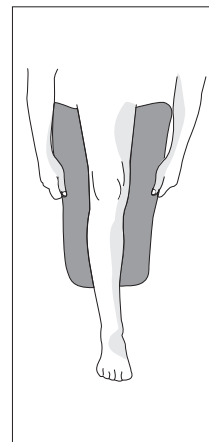


Figure 1

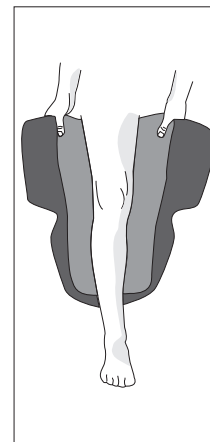


Figure 2

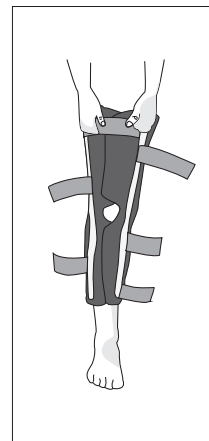


Figure 3

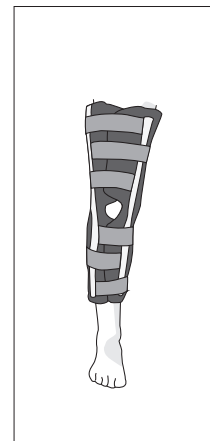


Figure 4



CONSULTEZ
LA **VIDÉO**
DE MISE EN PLACE