

MISE EN PLACE

Il est conseillé de mettre la ceinture en position debout ou allongé. Sa mise en place doit être assurée par un professionnel de santé.

Pour les ceintures NOVABELT et NOVASTOM, positionner le plastron au niveau de la zone abdominale puis fixer les sangles à l'aide des velcros à leur extrémité. Régler ensuite la tension en retendant indépendamment chaque sangle.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Les ceintures NOVATEX MEDICAL® NOVABDO sont des dispositifs à usage mono-patient et répondent à une prescription médicale.

Ne pas appliquer directement les ceintures NOVABDO sur une plaie ouverte ou sur une peau lésée ;


Ne pas appliquer les ceintures en cas d'allergie connue à un des composants.

CONSEILS D'ENTRETIEN :




MESURES NÉCESSAIRES POUR LES CEINTURES ADAPTÉES AUX MESURES (CSA, CMA) :


CIRCONFÉRENCES

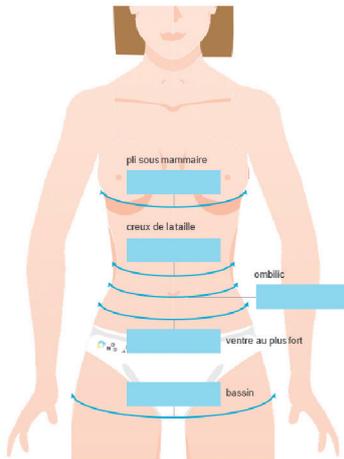


HAUTEUR DEVANT

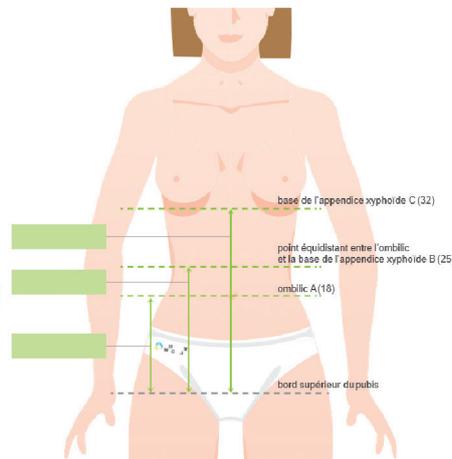

HAUTEUR DOS

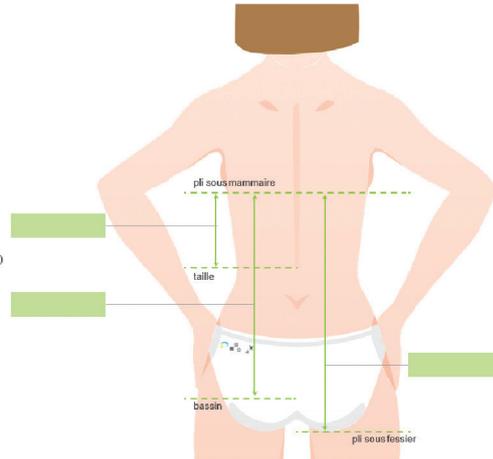

PROFIL

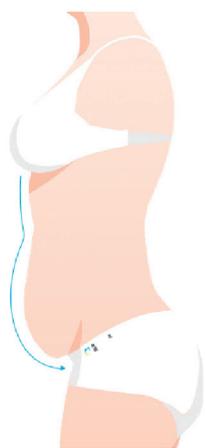

Nos matériaux sont sourcés en France et en Europe et sont labélisés Oeko-tex® Standard 100, système de contrôle et de certification indépendant pour les produits textiles.



4 rue des Entrepreneurs
PA les 6 Marianne
59124 ESCAUDAIN
T : +33 (0)3 74 01 03 97
Fax : +33 (0)3 27 24 09 88
contact@novatex-medical.com

Les ceintures abdominales de la gamme NOVABDO sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils donnent lieu à une prise en charge sur prescription médicale. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions présentes dans la notice d'utilisation.