


ORLIMAN®

CONFORT PLUS poignet-pouce

Attelle de poignet-pouce


■ Domaines d'application :

Post-opératoire, Traumatologie, Rééducation, Rhumatologie.

■ Indications :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, Blessure du scaphoïde, Tendinite de De Quervain, Rhizarthrose phase aiguë.

■ Caractéristiques :

2 éclisses (latérale amovible et palmaire) en aluminium modelable.

Éclisse latérale dotée d'un reposoir : évite une mauvaise rotation du pouce.

Réglage par sangles et boucles anti-vrilles.

Pince de crabe libérée par l'association d'une sangle et d'un repose pouce.

Existe en taille universelle avec éclisse dorsale ajustable au poignet (circonférence variable).

TVA

5,50 %

LPPR

 53.18 €
2189800


TOUR DE POIGNET

■ Tableau de taille :

Taille	Tour de taille	EAN 13	ACL 7	Référence
GAUCHE				
1	12 - 16 cm	3664338.000216	6033031	PM0314.GA1
2	16 - 18 cm	3664338.000223	6033032	PM0314.GA2
3	18 - 20 cm	3664338.000230	6033033	PM0314.GA3
Universelle	> 16 cm	3664338.000209	6033030	PM0314.GAU
DROIT				
1	12 - 16 cm	3664338.000155	6033021	PM0314.DR1
2	16 - 18 cm	3664338.000162	6033024	PM0314.DR2
3	18 - 20 cm	3664338.000179	6033025	PM0314.DR3
Universelle	> 16 cm	3664338.000193	6033027	PM0314.DRU

EXISTE EN TAILLE ENFANT

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

 smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.15/06/2017





ORLIMAN

CONFORT PLUS poignet-pouce

Attelle de poignet-pouce



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Extérieur : 100% Polyester,
Mousse intérieure : 100% Polyester, Intérieur : 100% coton,
Éclisses : Aluminium et polycarbonate.

■ Mise en place :

Enfiler l'attelle Confort Plus® poignet/pouce comme un gant en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet. Serrer les sangles, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec le velcro®. Dans le cas du modèle "taille universelle", positionner préalablement l'éclisse dorsale sur le dos du poignet en prenant soin de bien l'aligner dans l'axe du poignet. Serrer la sangle de pouce en prenant bien soin de l'ajuster au plus proche de la jointure pouce/index.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

