

# ManuLoc® Rhizo long

Immobilisation poignet / pouce et de l'avant-bras avec ouverture pour le pouce, adduction / abduction possible



Baleine métacarpienne et renforts latéraux



Fixation du pouce réglable de manière individuelle



Renfort en aluminium



Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons



Fermeture «velcro» avec arrêt anti-retour

## INDICATIONS

- États inflammatoires post-traumatiques ou post-opératoires, par ex. à la suite de traitements post-plâtrage en cas de fractures du scaphoïde
- Applications pré-opératoires
- Tendovaginite radiale (modérée)
- Rhizarthrose (grave)
- Luxations / Contusions
- Syndrome du canal carpien (modéré)
- Lésions au niveau des ligaments collatéraux, par ex. pouce du skieur

## AVANTAGES ET MODES D'ACTION

- L'orthèse empêche les faux mouvements de la région proximale et distale du poignet ainsi que de l'articulation métacarpo-phalangienne et carpo-métacarpienne du pouce
- Limitation des mouvements de rotation dans le poignet via le levier plus long de l'orthèse
- Immobilisation du poignet grâce à des renforts en aluminium ajustables
- Stabilisation du poignet en position fonctionnelle grâce à une baleine métacarpienne anatomique préformée
- Mise en place facile de l'orthèse avec une seule main grâce à des fermetures «velcro» très pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur les sangles
- Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons pour une plus grande longévité et une esthétique améliorée, au niveau du coude, la peau plus sensible est protégée par un rembourrage / un revêtement moelleux

## LES PLUS DE BAUERFEIND

- + Utilisation simplifiée
- + Agréable à la peau et perspirant
- + Zone confort
- + Mise en place facilitée
- + Adaptable selon les pathologies
- + Mesure numérique

## OPTIONS DE COMMANDE

**Coloris :** titane

**Modèles :** à droite, à gauche

## CONSEILS D'UTILISATION

- La baleine métacarpienne avec fentes d'aération, les renforts latéraux et les étriers en aluminium sont ajustables individuellement
- Durant le traitement, il est possible de mettre en place une dynamisation croissante du pouce et de retirer entièrement l'ouverture pour le pouce

TAILLE	0	1	2	3	RÉFÉRENCE
Circonférence poignet (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5345 0082 +0°
ACL droit	4046445791147	4046445791154	4046445791161	4046445791178	
ACL gauche	4046445791185	4046445791192	4046445791208	4046445791215	

+ = modèle (6) à droite  
(7) à gauche  
° = taille (0-3)


Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'assurance maladie.  
Lire la notice d'instructions avant utilisation.

**BASE DE REMBOURSEMENT LPPR**

**79,20 €**

Valable uniquement en France

Code LPPR: 7149076

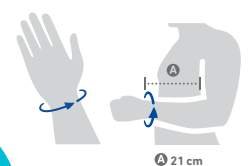

recommandé à partir d'une longueur d'avant-bras de 21 centimètres, mesurée à partir du poignet