


ORLIMAN®

MANU EASY BOXER 4e et 5e métacarpes

Poignet/Main



■ Domaines d'application :

Traumatologie, Post-opératoire.

■ Indications :

Fracture du 4e et/ou 5e métacarpes, Traumatismes du poignet/main-doigts, Immobilisation post-opératoire.

■ Caractéristiques :

- Système de serrage 4 points par lacets.
- Respirante et confortable.
- Traitement des plaies facilité.
- 1 éclisse palmaire modulable.
- 1 éclisse dorsale modulable.
- 1 mini-éclisse de doigts modulable.

TVA

5,50 %

LPPR

 79.20 €
2149440


TOUR DE POIGNET

■ Tableau de taille :

Taille	Tour de poignet	ACL 13	EAN 13	Référence
GAUCHE				
1	14 - 16 cm	3664338.002159	6087258	PM0613.GA1
2	16 - 18 cm	3664338.002166	6087259	PM0613.GA2
3	18 - 20 cm	3664338.002173	6087260	PM0613.GA3
DROIT				
1	14 - 16 cm	3664338.002128	6087235	PM0613.DR1
2	16 - 18 cm	3664338.002135	6087256	PM0613.DR2
3	18 - 20 cm	3664338.002142	6087257	PM0613.DR3

■ DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

 Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
 Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
 smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
 Siret : 420574626 RCS Rennes



ORLIMAN

MANU EASY BOXER 4e et 5e métacarpes

Poignet/Main



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

■ Mise en place :

Enfiler l'attelle Manu Easy Boxer® en prenant bien soin d'aligner l'éclisse palmaire dans l'axe formé par la paume de la main et l'avant-bras. Serrer le système de lacet au niveau du poignet. Serrer la sangle située au niveau du pouce et de l'index, puis serrer la sangle située au niveau des doigts immobilisés. Fixer avec la bande auto-agrippante. Si nécessaire, ajuster la tension au maintien souhaité.

Composition :

Extérieur : Polyester 95%,
Spandex 5%. Mousse intérieure :
Polychloroprene 100%. Intérieur :
Polyamide100%.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à
température ambiante.

