


**ORLIMAN**®

# GENULIG STAB

Genou



- **Domaines d'application :**  
Traumatologie, Rhumatologie, Rééducation.

- **Indications :**  
Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Tendinite du Fascia lata ou du tendon rotulien, Traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter, Reprise du sport.

- **Caractéristiques :**

- 2 cadrans articulés polycentriques crantés.  
La butée anti-recurvatum des cadrans permet de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion/extension.
- 1 pad circulaire silicone.  
La souplesse du silicone s'adapte parfaitement aux mouvements de flexion/extension pour un meilleur centrage rotulien. Les picots favorisent l'effet proprioceptif.
- 1 sangle de strapping en "X".  
L'élasticité de ses matériaux permet de réaliser une compression graduelle. Astucieuse, elle permet d'effectuer plusieurs types de strapping.
- 2 doubles ressorts spiralium.  
Les ressorts accompagnent l'action des ligaments lors des mouvements du genou.
- 1 sangle de strapping en demi-lune, à préconiser pour les pathologies rotuliennes.
- 1 pad silicone.  
L'association du pad et de la sangle de strapping demi-lune permet d'effectuer une poussée contrôlée de la rotule ou un appui sur le tendon limitant les vibrations et tensions excessives.
- Modèle bilatéral.

TVA

5,50 %

LPPR

102.29 €  
2152211
**TOUR DE CUISSE**

 Jambe en extension,  
mesurer 15 cm au  
dessus de la rotule.

- **Tableau de taille :**

Taille	Tour de cuisse	EAN 13	ACL 7	Référence
1	39-47 cm	3664338001831	6041762	GE0124.B11
2	47-53 cm	3664338001886	6041772	GE0124.B12
3	53-60 cm	3664338001893	6041774	GE0124.B13
4	60-67 cm	3664338001909	6041776	GE0124.B14
5	67-75 cm	3664338001916	6041777	GE0124.B15

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

 Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31  
smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)  
Siret : 420574626 RCS Rennes



**ORLIMAN**

## GENULIG STAB

Genou



### ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

### ■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

### ■ Mise en place :

Retirer tous les accessoires du produit. Ouvrir la genouillère. EN FONCTION DE LA PRESCRIPTION MÉDICALE OU DE LA PATHOLOGIE : Placer l'anneau rotulien ou le pad demi-lune à l'intérieur de la genouillère à l'aide du côté Velcro®. Si nécessaire, changer les cadrans articulés par les ressorts spiralium. Placer la genouillère sur la jambe (légèrement fléchie) et vérifier son centrage par rapport à la rotule. Placer la main dans le passe-doigts situé à l'arrière de la cuisse. Ajuster la compression désirée au niveau de la cuisse puis du mollet en fermant les attaches à l'aide des fermetures Velcro®. S'assurer que la compression est adaptée et qu'aucun point de pression ne subsiste. Si nécessaire, placer la sangle en «X» pour un renfort ligamentaire ou la sangle en demi-lune pour un soutien de la rotule selon les indications de votre praticien (se référer à la notice du produit pour la mise en place des sangles et des accessoires).

### Composition :

Polyuréthane 42 %, Polyamide 28 %, Polyester 15 %, Elasthanne 9 %, Coton 6 %, Pad : Silicone 100%.

### Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à température ambiante.

