


ORLIMAN®

LOMBOBELT ACTIV

Rachis lombaire



■ Domaines d'application :

Post-opératoire, Rhumatologie, Rééducation.

■ Indications :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lombalgie aiguë, Post-opératoire, Lombarthrose, Symptôme sacro-iliaque.

■ Caractéristiques :

- 4 sangles de serrage combinées à un système de poulies offrant une contention progressive et une correction posturale sans effort.
- Découpe spécifique et matériaux choisis pour offrir un excellent confort.
- Réglage distinct dorso-lombaire et sacro-lombaire permettant de diminuer les contraintes exercées sur les vertèbres lombaires.
- 2 hauteurs disponibles : 21 et 26 cm.
- Hauteur du plastron abdominal : 16 cm.

TVA

5,50 %

LPPR

 Hauteur 21 cm: 47.19 €
 201E00.021
 Hauteur 26 cm: 55.86 €
 201E00.022


TOUR DE TAILLE

■ Tableau de taille :

Taille	Tour de taille	ACL 13	Référence
Hauteur 21 cm			
1	65 - 75 cm	34015.9713084.7	TR0220.211
2	75 - 90 cm	34015.9713090.8	TR0220.212
3	90 - 105 cm	34015.9713109.7	TR0220.213
4	105 - 120 cm	34015.9713115.8	TR0220.214
5	120 - 140 cm	34015.9713121.9	TR0220.215
Hauteur 26 cm			
1	65 - 75 cm	34010.5172705.7	TR0218.261
2	75 - 90 cm	34010.5172728.6	TR0218.262
3	90 - 105 cm	34010.5172740.8	TR0218.263
4	105 - 120 cm	34010.5172757.6	TR0218.264
5	120 - 140 cm	34015.6224640.5	TR0218.265

■ DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

 Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
 Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
 smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
 Siret : 420574626 RCS Rennes



ORLIMAN

LOMBOBELT ACTIV

Rachis lombaire



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

■ Mise en place :

Décoller les sangles du plastron abdominal et étirer la ceinture. Repérer le logo Lomobelt Activ® pour positionner la ceinture dans le bon sens. Plaquer la ceinture sur votre ventre côté gauche en la maintenant avec votre main gauche. Avec votre main droite, à l'aide du passe-main, positionner la partie droite de la ceinture sur la bande opposée. Tirer sur les sangles latérales inférieures simultanément, jusqu'au niveau de contention souhaité et les fixer sur le plastron abdominal à l'aide des velcros®. Elles peuvent se superposer l'une sur l'autre. Répéter l'opération pour les sangles latérales supérieures.

Composition :

Nylon 50%, Polyester 20%,
Élasthanne 15%, Acier 15%, Sans
latex ni phtalate.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à
température ambiante.



Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.17/04/2020

