



ORLIMAN®

CHEVILIG

Cheville/Pied



■ Domaines d'application :

Rééducation.

■ Indications :

Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne et traitement d'œdème post-opératoire, Permet la reprise d'activité sportive.

■ Caractéristiques :

- Réalisée en tricot élastique extensible avec talon fermé.
- Système de sangle amovible auto-agrippante à rappel faisant fonction de strapping limitant l'inversion ou l'éversion de la cheville.

TVA

5,50 %

LPPR

16.19 €
201D02.6



TOUR DE CHEVILLE

■ Tableau de taille :

Taille	Tour de cheville	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.4872613.1
2	20 - 22 cm	34010.4872607.0
3	22 - 24 cm	34010.4872599.8
4	24 - 26 cm	34010.4872582.0
5	26 - 29 cm	34010.4872576.9

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.04/10/2018





ORLIMAN®

CHEVILIG

Chevillle/Pied



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Élasthanne 50%, Nylon 50%.

■ Mise en place :

MISE EN PLACE DE LA CHEVILLÈRE : Enfiler la chevillère telle une chaussette en prenant soin de placer correctement le talon dans la talonnière. **MISE EN PLACE DU STRAPPING EN "8"** pour une utilisation quotidienne : Placer la sangle sous le pied (velcro® vers le haut) de manière à avoir une longueur égale de chaque côté du pied. Tendre la sangle externe sur le cou-de-pied en l'amenant vers l'arrière de la cheville. Tout en maintenant la tension, rabattre la sangle vers l'avant en contournant la cheville au niveau du tendon d'Achille. La fixer sur elle-même avec le velcro®, au niveau du cou-de-pied. Répéter l'opération avec la sangle interne, de manière symétrique. **MISE EN PLACE DU STRAPPING LATÉRAL EXTERNE** pour une utilisation sportive : Placer la sangle sous le pied (velcro® vers le haut) de manière asymétrique, partie longue vers l'extérieur du pied. Tendre la sangle externe (longue) sur le cou-de-pied en l'amenant vers l'arrière de la cheville. Rabattre la sangle interne (courte) sur cette dernière et fixer avec le velcro® au niveau du cou-de-pied. Tendre la sangle externe et la rabattre vers l'avant sur le cou-de-pied, en contournant la cheville au niveau du tendon d'Achille. Faire passer cette même sangle sous le pied, vers l'extérieur du pied puis la fixer sur elle-même avec le velcro®, au niveau de la malléole externe.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à
température ambiante.

