



ORLIMAN®

ÉCHARPE DE CONTENTION DE BRAS

Épaule/Bras



- **Domaines d'application :**
Traumatologie, rhumatologie, rééducation.

- **Indications :**
Maintien antalgique du bras et de l'avant-bras.

- **Caractéristiques :**
 - Sangle capitonnée pour un meilleur confort, évitant l'effet cisaillement.
 - Sangle réglable en hauteur par boucle pour un ajustement adapté.
 - Languette de soutien du pouce.
 - Modèle bilatéral.

TVA

20 %

LPPR

15.24 €
1156684



LONGUEUR DE
L'AVANT-BRAS

Mesurer du coude au
poignet.

- **Tableau de taille :**

Taille	Mesure avant-bras	EAN 13	ACL 7	Référence
1	15 - 21 cm	3664338.000636	6034694	EB0913.B11
2	21 - 32 cm	3664338.000643	6034695	EB0913.B12
3	32 - 43 cm	3664338.000650	6034696	EB0913.B13

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.29/12/2017





ORLIMAN

ÉCHARPE DE CONTENTION DE BRAS

Épaule/Bras



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

■ Mise en place :

Placer l'avant-bras dans le manchon. Récupérer la sangle en la passant dans le dos puis par dessus l'épaule valide. Passer la sangle dans les anneaux puis la fixer à l'aide du velcro®. NOTE : Pour plus de confort, utiliser la languette de soutien pour le pouce.

Composition :

Sangle : Polyester : 65,5%. Coton : 34,5%, Mousse : Polyuréthane : 100%. Manchon : Polyester 95%, Coton 5%.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.



Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.29/12/2017

