


**ORLIMAN**®

Cryotherapy

# ATTELLE DE GENOU ÉVOLUTIVE CRYOPUMP

Genou



## ■ Domaines d'application :

Post-opératoire, Traumatologie, Rééducation.

## ■ Indications :

Traitement des lésions ligamentaires, Post-opératoire et post-traumatique.

## ■ Caractéristiques :

- 4 sangles de positionnement et maintien.
- 3 valves on/off.
- 2 compresses de froid anatomiques et 2 compresses de froid rectangulaires.
- 1 pompe à air amovible avec fixation auto-agrippante.
- 2 cadrans articulés amovibles.
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TVA

5,50 %

LPPR

 102.29 €  
2152211


TAILLE UNIQUE

## ■ Tableau de taille :

Taille	EAN 13	ACL 7	Référence
Unique	3664338.002395	6120301	GE0224.BIU

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

 Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
 Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31  
 smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)  
 Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.30/01/2019





**ORLIMAN**

Cryotherapy

# ATTELLE DE GENOU ÉVOLUTIVE CRYOPUMP

Genou



## ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

## Composition :

Genouillère : - Velours : Nylon 100 %, - Mousse : Polyéthylène 100 %, - Fixation auto-agrippante : Nylon 100 %. Compresse de froid : - Compresse : PVC 30 %, Nylon 27,5 %, Polyéthylène 22,5 %, Tetoron / Coton 20 %, - Gel : Eau 47 %, Propylène glycol 33 %, Carboxyméthylcellulose 20 %.

## ■ Mise en place :

**PREMIÈRE UTILISATION :** Placer les quatre compresses de gel dans le sachet de protection et mettre le tout au congélateur 2h avant utilisation. **MISE EN PLACE DES COMPRESSES ET DE LA GENOUILLÈRE :** - Préparer l'attelle en fixant les compresses de gel (la compresse rectangulaire sur l'arrière de l'attelle et la compresse anatomique sur la partie avec les valves). - Poser le produit à plat et ouvert puis placer la jambe au centre de l'attelle. - Placer la partie supérieure de la genouillère sur la rotule, valves au niveau de la cuisse, en prenant soin de positionner la rotule dans l'évidement. - Refermer la genouillère en enroulant les sangles du haut puis celles du bas. Réglage de la compression : - Vérifier que les valves sont en position ON, insérer le tuyau de la pompe à air puis pomper jusqu'à obtention de la compression souhaitée en fonction des différentes zones (arrière, latérale gauche, latérale droite). - Si besoin, diminuer la compression en appuyant sur le bouton de la pompe. - Refermer les valves (position OFF) avant de retirer la pompe. Fermeture de l'attelle : - Refermer l'attelle de genou en enroulant les sangles auto-agrippantes et respectant l'ordre suivant : 1 > sangle du haut de la cuisse. 2 > sangle du bas. 3 > sangle sous le genou. 4 > sangle au niveau de la rotule. - Ajuster le réglage si nécessaire. **NOTE :** - Suivant la prescription médicale, renouveler l'opération avec la seconde compresse de gel et placer la première utilisée au congélateur. - Possibilité de fixer la pompe sur la genouillère à l'aide de la fixation auto-agrippante ou de l'enlever en la dévissant au niveau de la valve. - Possibilité d'utiliser la genouillère seule en retirant la partie immobilisante et en ajoutant les cadrans articulés, de part et d'autre de la rotule.

## Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à température ambiante.

